



INSTRUÇÕES DE USO

XYLIMELTS BOCA SECA DISCOS ADESIVOS

FABRICANTE: QUEST PRODUCTS LLC INC

ENDEREÇO: 8201 104TH ST, SUITE 200, PLEASANT PRAIRIE, WI 53185 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO: CML – Centro Médico Logístico LTDA **CNPJ:** 23.378.089/0001-20

ENDEREÇO: Rua Inácio Luís da Costa, 1.632 São Paulo/SP CEP: 05.112-010 **SAC:** 11 4280-8000

Nº DE REGISTRO ANVISA: 81346509065

INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O XyliMelts é indicado para o alívio temporário dos sintomas de boca seca. A ação dura de 1 a 4 horas durante o dia e de 4 a 8 horas durante o sono.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO / MECANISMO DE AÇÃO

A formulação e a forma farmacêutica do XyliMelts ajudam a hidratar e refrescar a boca, aliviando os efeitos causados pela boca seca. Os discos adesivos do XyliMelts Boca Seca possuem duas camadas. A camada clara é feita principalmente de goma de celulose e xilitol e a camada mais escura possui um adesivo de goma vegetal que, quando umedecido, se adere à gengiva ou ao dente molar. A saliva bucal dissolve lentamente o disco. O xilitol e a goma de celulose são umectantes que revestem e lubrificam a boca para aliviar a boca seca. O xilitol é um edulcorante natural que melhora a sensação de boca seca, pois estimula a formação da saliva, como qualquer edulcorante. O sabor de menta suave ajuda na salivação.

MODO DE USO

1. Coloque um disco sobre a gengiva ou sobre a parte externa de um dente molar, superior ou inferior, com o lado branco do disco voltado para a bochecha e o lado escuro adesivo em contato com a gengiva e/ou os dentes.
2. Use a língua para empurrar e acomodar o disco até um ponto confortável.
3. Uma vez acomodado, deixe que sua bochecha o mantenha no local parado por não menos que 10 segundos e, durante este período, não empurre com o dedo nem toque com a língua, pois isso poderá desalojar o disco e interromperá a adesão, que se fortalece com o tempo e atinge sua força total em 5 minutos.
4. Se não gostar do local, desaloje o disco dentro de no máximo 1 minuto após a colocação inicial e empurre-o com a língua para um novo local, repetindo o procedimento do item 3. Durante a noite: Para dormir, use dois (2) discos, colocando um em cada lado da boca. Algumas pessoas acham que um disco de cada vez é suficiente. Durante o dia: Use conforme necessário.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar e transportar até 60% de umidade a 25° C. Armazene em um local seco.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Não recomendado para crianças com menos de 5 anos de idade devido ao risco de asfixia.



INSTRUÇÕES DE USO

XYLIMELTS BOCA SECA DISCOS ADESIVOS

ADVERTÊNCIA

Fabricante recomenda uso único. Fabricante recomenda proibido reprocessar. Se houver irritação, alterne a colocação entre vários locais. Não recomendado para crianças menores de 5 anos devido ao risco de asfixia. Para uso à noite, enquanto dorme, posicione o(s) disco(s) na gengiva ou nos dentes, ou em ambos, na parte externa de um molar, e não no céu da boca, onde você pode soltá-lo com a língua enquanto dorme e ele pode se alojar na garganta ou no pulmão, causando desconforto até que se dissolva. O xilitol é venenoso para cães, portanto, mantenha o XyliMelts longe deles. Armazene em um local seco. Se o organismo não estiver acostumado, algumas pessoas sentem desconforto intestinal quando ingerem mais de 3.000 mg de xilitol (aproximadamente 6 discos) em um curto período. A liberação de longa duração do XyliMelts permite o uso eficaz de uma pequena quantidade de xilitol distribuída ao longo do tempo, eliminando o risco de desconforto. Umidade de 65% a 25° C ou umidade de 60% a 35° C pode causar aparência adversa da camada escura adesiva dos discos.

PRECAUÇÕES

Não recomendado para crianças com menos de 5 anos de idade devido ao risco de asfixia.

CONTRAINDICAÇÃO

Não se aplica.

EFEITOS ADVERSOS

Não se aplica.

PRAZO DE VALIDADE

3 anos

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO

Não aplicável

FORMAS DE APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO

ORA00310 - XyliMelts Boca Seca Discos Adesivos Folheto Caixa com 4 unidades sabor Menta Suave;
ORA00352 - XyliMelts Boca Seca Discos Adesivos Strip Caixa com 4 unidades sabor Menta Suave;
ORA91028 - XyliMelts Boca Seca Discos Adesivos Folheto caixa com 20 unidades sabor Menta Suave;
ORA30006 - XyliMelts Boca Seca Discos Adesivos Folheto caixa com 40 unidades sabor Menta Suave.